

Lista masek kompatybilnych z urządzeniami

Niniejszy dokument przedstawia listę masek kompatybilnych z urządzeniami firmy ResMed wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych oraz wymagane ustawienia maski. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego zastosowania tych urządzeń zawiera ich odpowiednia Instrukcja użytkowania.

Uwaga: Nie wszystkie rodzaje produktów są dostępne w każdym regionie.

Maski pełnotwarzowe 1

Urządzenie	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Pillows	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Pillows	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AirSense™ 11	N/z	Pillows	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AirMini™	X	X	X	✓	✓	✓	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/z	Pillows	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/z	Pillows	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/z	Pillows	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/z	N/z	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
Lumis™	N/z	Pillows ³	Full Face ³	Full Face ³	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/z	Pillows	Full Face	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
S9 Escape™	N/z	Pillows	Full Face	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AutoSet CS™ 2	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	FULL FACE	FULL FACE
AutoSet CS™ (S9)	N/z	Pillows	N/z	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/z	Pillows	N/z	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/z	N/z	N/z	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
C-Series Tango™	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.
S7™ Lightweight	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	MIRAGE	STANDARD
S8™ Auto 25	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.

Urządzenie	AcuCare F1-4	AirFit™ F40 ⁴	AirFit™ F30i ¹ / AirFit™ F30i Non Magnetic ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her / AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
S8 Escape™ II	N/z	N/z	N/z	N/z	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.			
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.	
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Adapt (S9)	N/z	Pillows	Full Face	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/z	Pillows	Full Face	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
VPAP™ Malibu	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Auto 25	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/z	Pillows	Full Face	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/z	N/z	N/z	N/z	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/z	Pillows	Full Face	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
VPAP™ ST-A (S9)	N/z	N/z	N/z	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/z	N/z	N/z	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
S9 VPAP™ Tx	N/z	Pillows ²	Full Face ²	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	N/z
VPAP™ Tx	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	FULL FACE	N/z
Stellar™	N/z	N/z	N/z	N/z	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	N/z
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	✓	N/z
VS III™	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	✓	N/z
Astral™	FULL FACE	N/z	N/z	N/z	FULL FACE	FULL FACE	N/z	N/z

¹ Funkcja SmartStop może nie działać zgodnie z opisem, gdy ta maska używana będzie z niektórymi urządzeniami CPAP lub urządzeniami do leczenia dwupoziomowego.

² Z wyłączeniem trybów PAC i iVAPS. Kompatybilność wyłącznie w przedziale ciśnień od 4 do 25 cm H2O.

³ To połączenie maski i urządzenia zostało uznane za bezpieczne do użytku na podstawie oceny dokładności monitorowania ciśnienia, objętości, wentylacji minutowej i częstości oddechów oraz ich alarmów, jeśli mają zastosowanie. Można zaobserwować niewielkie różnice w wydajności, szczególnie przy wyższym ciśnieniu lub przepływie. Zgodnie z oczekiwaną praktyką kliniczną, skuteczność wentylacji i alarmów powinna być weryfikowana przez personel kliniczny.

⁴ Funkcja SmartStart może nie działać zgodnie z opisem, gdy ta maska używana będzie z niektórymi urządzeniami CPAP lub urządzeniami do leczenia dwupoziomowego.

N/z = Nie zatwierdzono użycia maski z tym urządzeniem.

✓ = Kompatybilna X = Niekompatybilna

Maski pełnotwarzowe 2

Urządzenie	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her / Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirSense™ 11	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirMini™	X	X	X	X	X	X

Urządzenie	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
Lumis™	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 Escape™	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ 2	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE ¹	FULL FACE
AutoSet CS™ (S9)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
C-Series Tango™	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.					
S7™ Lightweight	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.					
S8 Escape™ II	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE ¹	FULL FACE
VPAP™ Adapt (S9)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Malibu	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VPAP™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ S / VPAP™ ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST-A (S9)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
S9 VPAP™ Tx	N/z	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face	Full Face
VPAP™ Tx	N/z	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE

Urządzenie	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
Stellar™	N/z	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE
VS Ultra™ / VS Integra™	N/z	✓	✓	N/z	✓	✓
VS III™	N/z	✓	✓	N/z	✓	✓
Astral™	N/z	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE	FULL FACE

Maski nosowe 1

Urządzenie	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	X	Nasal
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	X	Nasal
AirSense™ 11	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	N/V	Nasal
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
Lumis™	X	Pillows ³	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 Escape™	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.			
S7™ Lightweight	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/z	N/z	N/z	N/z	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.					
S8 Escape™ II	X	N/z	N/z	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/z	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/z	N/z	N/z	N/z	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/z
VPAP™ III ST-A	X	N/z	N/z	N/z	N/z	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/z

Urządzenie	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	X	N/z	N/z	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/z	N/z	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/z	N/z	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	X	Pillows ²	N/z	Pillows	N/z	Pillows	Pillows	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Tx	X	N/z	N/z	N/z	N/z	PILLOWS	PILLOWS	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
Stellar™	X	N/z	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS ¹	PILLOWS ¹	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z
VS III™	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	✓	N/z	✓
Astral™	X	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	N/z	N/z	Nasal	N/z	Nasal	Nasal

¹ Funkcja SmartStop może nie działać zgodnie z opisem, gdy ta maska używana będzie z niektórymi urządzeniami CPAP lub urządzeniami do leczenia dwupoziomowego.

² Z wyłączeniem trybów PAC i iVAPS. Kompatybilność wyłącznie w przedziale ciśnień od 4 do 25 cm H2O.

³ To połączenie maski i urządzenia zostało uznane za bezpieczne do użytku na podstawie oceny dokładności monitorowania ciśnienia, objętości, wentylacji minutowej i częstości oddechów oraz ich alarmów, jeśli mają zastosowanie. Można zaobserwować niewielkie różnice w wydajności, szczególnie przy wyższym ciśnieniu lub przepływie. Zgodnie z oczekiwaną praktyką kliniczną, skuteczność wentylacji i alarmów powinna być weryfikowana przez personel kliniczny.

N/z = Nie zatwierdzono użycia maski z tym urządzeniem.

✓ = Kompatybilna X = Niekompatybilna

Maski nosowe 2

Urządzenie	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Pediatrycz	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirSense™ 11	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/z	Nasal	N/z	N/z	Nasal
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/z	Nasal	N/z	N/z	Nasal
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/z	Nasal	N/z	N/z	Nasal
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/z	Nasal	N/z	N/z	Nasal
Lumis™	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal	N/z	Nasal	N/z	N/z	Nasal
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/z	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal

Urządzenie	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 Escape™	N/z	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ 2	N/z	N/z	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/z	ACTIVA	N/z	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/z	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/z	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
C-Series Tango™	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.						N/z
S7™ Lightweight	N/z	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.						N/z
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/z
S7 AutoSet Respond™	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/z
S8™ Auto 25	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/z	N/z	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/z	N/z	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.							
S8 Escape™ II	N/z	N/z	Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skonsultować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/z	N/z	Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/z	N/z
VPAP™ III ST-A	N/z	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/z	N/z
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/z	N/z	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/z	N/z	VISTA¹	VISTA	ULTRA	N/z	ACTIVA	N/z	N/z	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/z	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/z	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ Malibu	N/z	N/z	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/z	N/z	N/z	N/z	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/z	N/z	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/z	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/z	N/z	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/z	N/z	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediatria	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediatria	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal
S9 VPAP™ Tx	Pediatria	N/z	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	Nasal	N/z	N/z	Nasal
VPAP™ Tx	N/z	NASAL	NASAL	NASAL	NASAL-ULTRA	N/z	NASAL	N/z	N/z	NASAL
Stellar™	Pediatria	NASAL	NASAL	NASAL	ULTRA	N/z	NASAL	N/z	N/z	N/z
VS Ultra™ / VS Integra™	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z
VS III™	N/z	✓	✓	✓	✓	N/z	✓	N/z	N/z	N/z
Astral™	Pediatria	Nasal	Nasal	Nasal	Nasal Ultra	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z

N/z = Nie zatwierdzono użycia maski z tym urządzeniem.

Wkładki nosowe

Urządzenie	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Pillows	X	Pillows ²	N/z	N/z	Pillows	Pillows	Pillows
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	Pillows	X	Pillows ²	N/z	N/z	Pillows	Pillows	Pillows
AirSense™ 11	Pillows	X	Pillows	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Pillows	X	Pillows ²	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Pillows	X	Pillows ²	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Pillows	X	Pillows ²	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/z	X	Pillows ²	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
Lumis™	Pillows ⁴	X	Pillows ²	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Pillows	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
S9 Escape™	Pillows	X	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
AutoSet CS™ 2	N/z	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z
AutoSet CS™ (S9)	Pillows	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Pillows	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/z	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
C-Series Tango™	N/z	X		Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.				
S7™ Lightweight	N/z	X		Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.				
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/z	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	N/z	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	N/z	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	N/z	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/z	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/z	X		Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skontaktować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.				
S8 Escape™ II	N/z	X		Wymaga kalibracji ciśnienia przy wartości 12 cm H2O. Należy skontaktować się z lekarzem i zapoznać z instrukcją obsługi.				
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/z	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	N/z	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/z	X		Nie jest wymagany wybór ustawienia. Przed zmianą typu maski należy skontaktować się z lekarzem.				
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/z	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	N/z	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/z	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/z	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z
VPAP™ Adapt (S9)	Pillows	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Pillows	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ Malibu	N/z	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT

Urządzenie	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ Auto 25	N/z	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Pillows	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/z	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Pillows	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ ST-A (S9)	N/z	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/z	X	Pillows ²	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
S9 VPAP™ Tx	Pillows ³	X	Pillows ²	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows
VPAP™ Tx	N/z	X	PILLOWS ²	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS	PILLOWS
Stellar™	N/z	X	PILLOWS ^{1,2}	PILLOWS ¹	PILLOWS ¹	PILLOWS ¹	PILLOWS ¹	PILLOWS ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/z	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z
VS III™	N/z	X	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z	N/z
Astral™	N/z	X	N/z	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows	Pillows

¹ Funkcja SmartStop może nie działać zgodnie z opisem, gdy ta maska używana będzie z niektórymi urządzeniami CPAP lub urządzeniami do leczenia dwupoziomowego.

² Dokładność objętości oddechowej/wentylacji minutowej może być obniżona w przypadku korzystania z maski AirFit P10 w trybach dwupoziomowych zwłaszcza przy wyższych poziomach wspomagania ciśnieniowego.

³ Z wyłączeniem trybów PAC i iVAPS. Kompatybilność wyłącznie w przedziale ciśnień od 4 do 25 cm H₂O.

⁴ To połączenie maski i urządzenia zostało uznane za bezpieczne do użytku na podstawie oceny dokładności monitorowania ciśnienia, objętości, wentylacji minutowej i częstości oddechów oraz ich alarmów, jeśli mają zastosowanie. Można zaobserwować niewielkie różnice w wydajności, szczególnie przy wyższym ciśnieniu lub przepływie. Zgodnie z oczekiwaną praktyką kliniczną, skuteczność wentylacji i alarmów powinna być weryfikowana przez personel kliniczny.

N/z = Nie zatwierdzono użycia maski z tym urządzeniem.

✓ = Kompatybilna X = Niekompatybilna